




## INSTRUCCIONES DE USO

**El empleo correcto de un monitor RespisenSense mejorará en gran medida su experiencia como usuario. Tenga a bien leer atentamente estas instrucciones.**


**IMPORTANTE:** Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el monitor • Guarde estas instrucciones como material de referencia durante toda la vida útil del monitor • Utilice este monitor con sentido común, ya que dicho monitor carece de la capacidad de abordar todas las enfermedades respiratorias • No utilice correas fabricadas en casa para sostener el monitor, ya que tales elementos representan un riesgo para la salud del bebé • Examine el monitor antes de usarlo cada vez y no lo utilice si lo encuentra dañado o con signos de desgaste o mal funcionamiento • El monitor debe utilizarse únicamente donde sus alarmas puedan ser oídas fácilmente por la persona a cargo del cuidado del bebé • No abra el monitor • El monitor no posee partes internas que el usuario pueda arreglar • Mantenga el monitor guardado fuera del alcance de los niños cuando no lo utilice • El monitor contiene partes pequeñas que representan un riesgo para los niños de desarmarse • Elimine partes del empaquetado que puedan representar un riesgo para los niños • En ciertos casos, puede que sea necesaria la resucitación cardiopulmonar para revivir a un bebé.

Tenga cuidado de los movimientos exteriores importantes que pudieran confundir al monitor, por ejemplo mientras viaja o empuja al bebé en un cochecito sobre superficies desiguales, o permitiendo que el monitor también toque algún otro cuerpo mientras está en funcionamiento. Bajo tales circunstancias el monitor puede no poder distinguir confiablemente entre los movimientos del bebé y los movimientos externos.

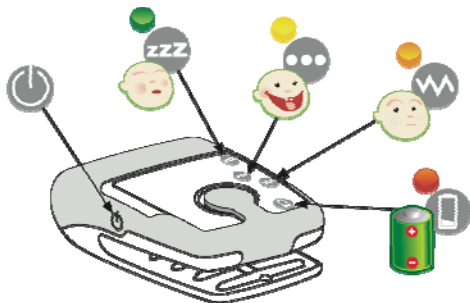


## OPERACIÓN DEL MONITOR


### ENCENDIENDO MONITOR ON AND OFF

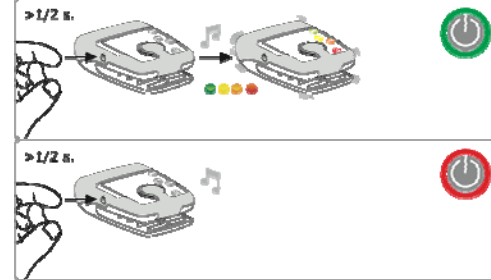

### TICK SONIDO CARACTERÍSTICO

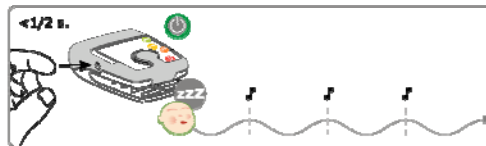

### TESTEAR MONITOR Y BATERÍA

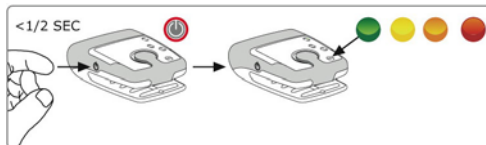





## COLOCANDO EL MONITOR




**Nota:** No utilice el monitor en las pretinas excesivamente gruesas que podrían torcer y dañar el clip del monitor. Si usted permite que el bebé duerma en su lado, coloque por favor el monitor levemente hacia ese lado para asegurar el buen contacto con el vientre del bebé y para asegurar la operación

### Luces:

-  Luz verde marcada "zzz" Destellará cuando se detecte movimiento rítmico, habitualmente cuando el bebé descansa.
-  Luz amarilla marcada "...". Destellará con los movimientos generales que son detectados, usualmente cuando el bebé está despierto y activo.
-  Luz Anaranjada Destellará repetidamente mientras el estimulador táctil se encuentre operando o la alarma está sonando. Si el estimulador táctil fue activado, pero el movimiento se reinicia nuevamente dentro de los 15 segundos, el indicador NARANJA se encenderá, en lugar de los indicadores VERDE o AMARILLO.
-  Luz Roja Destellará cuando un error en el sistema es detectado o cuando la vida útil de la batería a llegado a su fin.

## FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

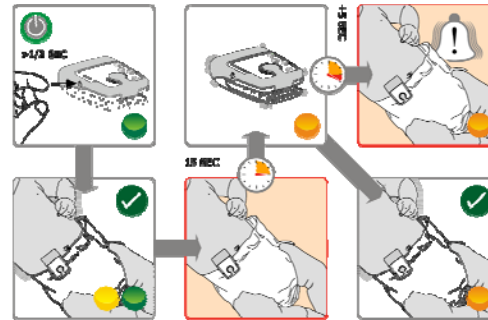

### Alarma:

La alarma primaria sonará, si ningún movimiento ha sido detectado por un total de 20 segundos consecutivos. A pesar de que esto podría indicar que el bebé necesita atención urgente por parte de la persona a cargo o el profesional médico, siempre será mejor reaccionar de la manera más calma posible ante dichas alarmas. ¡Nunca sacuda a un bebé!  
La alarma secundaria sonará si el estimulador táctil ha sido activado repetidamente, pero el movimiento se ha reiniciado en cada oportunidad dentro de menos de 5 segundos de la estimulación. Esto puede indicar que la unidad o el pañal no están óptimamente ubicados, que el pañal está demasiado húmedo y está alejando el monitor del vientre del bebé, o que el movimiento se ha pausado o es demasiado superficial como para detectar, pero se reinició luego de la estimulación. Intente ajustar la banda del pañal, cambiar un pañal húmedo o utilizar un pañal más grande.

### Consejos:

Con el fin de asegurar una operación confiable y minimizar el riesgo de falsas alarmas, verifique que el pañal del bebé se encuentre ajustado y que sea lo suficientemente grande como para permitir que el borde superior del monitor se encuentre cerca del nivel del ombligo del bebé. Los movimientos del vientre del bebé son detectables con mayor facilidad en cercanías y adyacencias del ombligo del bebé. En el caso de que la unidad tenga dificultad en detectar los movimientos, es probable que el pañal no esté ajustado o que su tamaño sea un tamaño menor. Si los pañales que son utilizados son muy finos, deslizar un pedazo de paño sobre el borde del pañal antes de colocar el monitor, esto permitirá un mejor ajuste. En el acontecimiento inverosímil de que el monitor se apague durante la operación, no podrá detectar los movimientos del bebé, y la alarma. - Asegúrese de que siga estando el área del sensor del monitor en buen contacto con el vientre del bebé a través del período de supervisión.

**Registre su monitor:** Rogamos registrar de inmediato su monitor. La información recabada será utilizada para mejorar los productos y servicios de Infantrust y nunca se empleará para distribuir material publicitario de ningún tipo. Toda la información suministrada se encuentra protegida por las políticas de privacidad de Infantrust, y nunca se comparte, vende o alquila. El registro de su monitor le permitirá subir una foto de su bebé al sitio de Internet de la familia RespisenSense. Ud. podrá registrar su monitor a través de nuestra página de Internet en [www.respisenSense.com](http://www.respisenSense.com) o [www.babysounds.cl](http://www.babysounds.cl) Alternativamente, podrá enviar un mensaje de texto con el número de serie BV... impreso en su monitor y su paquete al número +27 83 560 3443. Se aplicará la tarifa normal para servicio - sin ningún costo adicional

**Empleo de un monitor acústico/de video (opcional):** Ud. puede retransmitir el sonido de alarma del monitor hacia otras partes de su propiedad por medio del sistema que mejor se adapte a sus necesidades, dentro de una amplia gama de monitores de sonido para bebés disponible en el mercado. Ud. podrá elegir entre monitores de sonido simples, monitores de sonido y video y monitores de temperatura, aquellos que utilizan tecnología digital o analógica, que poseen canales simples, duales o múltiples, y que se comercializan en versiones recargables o alimentadas vía red. Siga las instrucciones para tales dispositivos y verifique la eficacia de su instalación para asegurar la adecuada recepción de las alarmas del monitor.

**Garantía:** INFANTRUST brinda dos años de garantía sobre el producto a partir de la fecha de venta. Debido a que INFANTRUST no controla el modo en el que se almacena y utiliza el monitor, la garantía no cubre la vida útil de la batería. El cliente debe presentar evidencia de su compra junto con cada reclamo. Dentro del período de garantía, INFANTRUST procederá a eliminar cualquier defecto en el monitor que resulte de falla de material o mano de obra, y reemplazará el monitor sin cargo alguno, aunque sin cubrir el costo de envío. La presente garantía alcanza cualquier país donde INFANTRUST o su distribuidor oficial provean el monitor. La presente garantía quedará sin efecto cuando el monitor sufra daños o sea abierto o manipulado.


Por favor dirija todas las preguntas sobre el producto primero a su distribuidor local [www.babysounds.cl](http://www.babysounds.cl) Visite [www.respisenSense.com](http://www.respisenSense.com) para mayor información sobre demostraciones y últimas novedades de productos. Envíenos cualquier sugerencia o comentario a [support@infantrust.com](mailto:support@infantrust.com).

## MANTENIMIENTO DEL MONITOR

**Mantenimiento:** Para limpiar su unidad, frótelas con un paño suave y levemente mojado. No enjuague el monitor ni lo sumerja en cualquier líquido. Evite salpicaduras en cualquier abertura. La entrada de líquidos anulará la garantía. No utilice productos químicos para limpiar su monitor, ya que ellos podrían irritar la piel de su bebé. Evite el ingreso de pelusa o suciedad en el puerto de sonido para evitar que la alarma sea silenciada.

### Reemplazando la batería:

**Precaución:** peligro de fuego y quemaduras • No recargue, desarme, exponga a temperaturas sobre los 212°F (100°C) o incinere • Mantenga fuera del alcance de los niños • Guarde en el empaque original hasta que este listo para utilizar • Disponga de la batería usada puntualmente • Nunca lleve una batería a su boca • Evite almacenar en altas temperaturas, luz solar y humedad • Evite condensación.

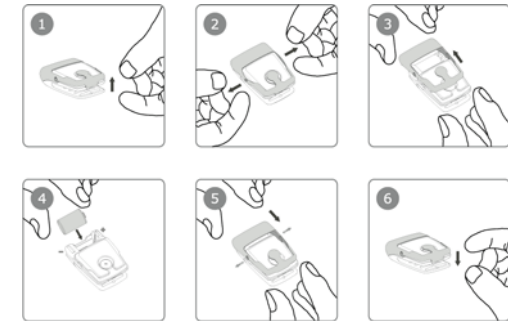

**Exención de Responsabilidad:** Este monitor de bebé es un elemento de ayuda para padres y no representa ningún dispositivo médico o sustituto del cuidado humano. Está fabricado para ser utilizado bajo condiciones de operación seguras, y debe emplearse de modo responsable y de acuerdo con las instrucciones detalladas que se brindan en este folleto. El monitor no es adecuado para detectar apnea obstructiva. El diagnóstico y control de la enfermedad estará a cargo de un profesional médico. Los niños de nacimiento prematuro y otros infantes de alto riesgo y aquellos con conocida predisposición a la apnea deberán ser controlados por un médico. Este producto no puede abordar todos los riesgos respiratorios ni fue diseñado para ser utilizado en situaciones de asistencia a la vida. Los clientes que emplean este monitor asumen el riesgo, e Infantrust Parenting Solutions (Propietario) Limited, su personal, agentes, contratistas, fabricantes, distribuidores y asociados ("INFANTRUST") no serán considerados responsables ante cualquier pérdida, daño o lesión, incluyendo daño mediado u otro daño o lesión sufrida por el cliente o cualquier otra persona que surja de o guarde relación con el uso o fabricación del monitor, incluyendo pérdida, daño o lesión sufrida por el cliente o cualquier otra persona como resultado de defectos (ya sea evidentes o latentes) respecto del monitor, y todas las garantías, ya sean expresas, implícitas o tácitas, y cualquier otra responsabilidad que surja de cualquier causa se excluye expresamente por el presente, y el cliente mantiene indemne por el presente a INFANTRUST con relación a cualquiera de dichas responsabilidades.

### Especificaciones Técnicas:

Batería RespisenSense ER14250M 3.6V Lithium.  
Alarma Primaria Tono de vibrado rápido.  
Alarma Secundaria Tono de vibrado lento.

Diseñado y fabricado en South Africa por Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, Matieland, 7602, South Africa.

ZA2006/01793 and GB2419961 apply. Further patents pending.

Todos los derechos reservados; RespisenSense, Infantrust, TummyTickle y los logos asociados son marcas Registradas.

El mejoramiento continuo de los monitores RespisenSense, la apariencia y especificaciones pueden cambiar sin mediar aviso.